<b>B</b> BRAUN		B. Braun Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd. 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	
	Form 表格	Document No.文件号:	CO-CN04-G-4-2-02-002-1-A
Recall Report - Medical Device 医疗器械召回事件报告表		Effective Date 生效日期:	2018-11-01
		Version 版本号:	1.0
医红硷恢行四部件	TK II AX	Page 页码:	1 of 2

## 提交: 図企业所在地省级药品监督管理部门

## □器械注册/备案部门

产品名称	胸腔心血管外科手术器械、止血钳、胸腔心血管外科手术器械、组织钳、妇科组织钳、止血钳	注册证或备 案凭证编码	国械注进 20142035623 国械备 20160546 号 国械注进 20162034282 国械备 20160261 号 国械备 20161497 号 国械备 20150788	
生产企业名称	Aesculap AG 蛇牌股份有限公司			
代理人名称	贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司			
召回单位负责人 和联系方式,经 办人和联系方式	负责人: 刘涛 021-22163260, 经办人: 王敏 021-22163518			
产品的适用范围	外科手术			
涉及地区和国家	全球	召回级别	三级	
涉及产品生产 (或进口中国) 批次、数量	8509 件	涉及产品 型号、规格	见附表	
识别信息 (如批号)	见附表	涉及产品在 中国的销售 数量	8470 件	
召回原因简述	根据市场反馈,止血钳因根据目前设计中未涵盖的适应症(例如较大的血管或医用材料的夹持)使用,从而导致客户投诉在使用过程中因"鳃部断裂"故障造成的产品损坏。根据其设计和钳口的限制,止血钳在临床中被设计和用于夹持小血管。如果产品发生故障"鳃部断裂",产品的功能就会丧失,这可能会导致血管未被正确封堵和/或部件原位脱落。在极少数极端最坏情况下,如果产品在体外循环术中与另一个产品结合使用,产品故障可能会导致长期的健康后果。			
纠正行动简述 (包括召回要求 和处理方式等)	此次召回仅为说明书更新的告知,不涉及任何产品的退回。行动措施包括: 1. 向客户发送通知,并经其通知相关用户。 2. 获取客户确认回执。			

负责人: 刘涛

报告单位: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司

报告人:王敏

报告日期: 2024年12月23日

<b>B</b> BRAUN		B. Braun Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd. 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司	
	Form 表格	Document No.文件号:	CO-CN04-G-4-2-02-002-1-A
Recall Report - Medical Device 医疗器械召回事件报告表		Effective Date 生效日期:	2018-11-01
		Version 版本号:	1.0
医红 命恢行 四事件	TIKITAX	Page 页码:	2 of 2

## 附表 产品型号规格列表

注皿证旦/夕安旦	立旦夕秒	刑品切构
注册证号/备案号	产品名称	型号规格
国械注进20142035623	胸腔心血管外科	BH139R、BH143R、BH150R、BH151R、BH191R、BH196R、BH197R、
	手术器械	BH198R、BH202R、BH203R、BH224R、BH227R、BH228R、BH230R、
		BH231R、BH234R、BH238R、BH239R、BH300R、BH316R、BH318R、
		BH361R、BH410R、BH422R、BH448R、BH450R、BH655R、BH800R、
		BH801R、BH804R、BH805R、BH812R、BH814R、BJ009R、BJ037R、B
		J038R、BJ039R、BJ051R、FB440R、FB441R、FB442R、FB443R、FB44
		4R、FB446R、FB447R、FB448R、FB458R、FB459R、FB461R、FB462R
		、FB469R、FB483R、FB486R、FB487R、FB496R、FB497R、FB498R、
		FB499R、FB526R、FB527R、FB533R、FB534R、FB568R
国械备20160546号	止血钳	BH104R、BH105R、BH108R、BH114R、BH115R、BH118R、BH119R、
		BH120R, BH121R, BH130R, BH131R, BH168R, BH170R, BH171R,
		BH178R、BH199R、BH205R、BH206R、BH207R、BH210R、BH211R、
		BH212R、BH213R、BH214R、BH215R、BH225R、BH456R、BH470R、
		BH471R、BH472R、BH473R、BH474R、BH610R、BH612R、BH615R、
		BH619R、BH642R、BH643R、BH644R、BH645R、BH646R、BH647R、
		BH648R, BH649R, BH650R, BH651R, BH652R, BH653R, BH654R,
		BH831R、BH833R、BH949R、BH951R、BH952R、BH957R、BH959R、
		BH961R、BH963R、BH965R、MB229R、BH618R、BH630R、BH631R
国械注进20162034282		BH135R、BH140R、BH141R、BH145R、BH154R、BH155R、BH160R、
	手术器械	BH161R、BH164R、BH166R、BH176R、BH177R、BH200R、BH201R、
		BH216R、BH217R、BH302R、BH304R、BH332R、BH333R、BH334R、
		BH335R、BH336R、BH337R、BH338R、BH339R、BH412R、BH413R、
		BH414R、BH415R、BH424R、BH425R、BH442R、BH443R、BH444R、
		BH445R、BH446R、BH808R、FB729R、FB741R、FB742R
日世夕20170271日	ΛΠ ΛΠ <i>Ε</i> ΙΙ	DIGITAL DIGITA
国械备20160261号	组织钳	BJ015R、BJ016R、BJ017R、BJ018R、BJ019R、BJ020R、BJ021R、BJ02
		2R、BJ024R、BJ025R、BJ026R、BJ031R、BJ032R、BJ033R、BJ034R、
		BJ035R、BJ041R、BJ042R、BJ043R、BJ044R、BJ045R、BJ047R、BJ04
		8R, BJ050R, BJ052R, BJ055R, BJ058R, BJ059R, BJ060R, BJ061R,
		BJ062R、BJ067R、BJ068R、BJ070R、BJ073R、BJ080R、BJ081R、BJ08
		2R、BJ086R、BJ090R、BJ091R、BJ096R、BJ103R、BJ106R、BJ120R、
		BJ121R、BJ122R、BJ123R、BJ124R、BJ130R、BJ131R、BJ132R、FB9
日世夕20171407日	47 11 40 40 6H	61R, MD569
国械备20161497号	妇科组织钳	BJ500R、BJ501R、BJ510R、BJ511R、BJ517R、BJ519R、BJ520R、BJ52
		1R、BJ522R、BJ524R、BJ527R、BJ530R、BJ531R、BJ532R、BJ534R、
		BJ535R、BJ536R、BJ537R、BJ540R、BJ541R、BJ550R、BJ551R、BJ55
日44夕00150700	.L. m ćH	2R、BJ553R
国械备20150788	止血钳	MD464、MD468、MD469